

TONOVET®

Tonomètre vétérinaire




TONOVET® mesure la pression intraoculaire de façon simple, précise et indolore pour l'animal

Un procédé innovant :

TONOVET® utilise une nouvelle technologie par méthode "rebond".

Une sonde ultra légère vient en percussion sur la cornée.

Ce procédé très rapide (dans la plupart des cas, il ne provoque même pas un clignement de l'oeil) ne causera qu'une gêne minimale chez le patient qui, souvent, ne prendra pas conscience de ce bref contact.

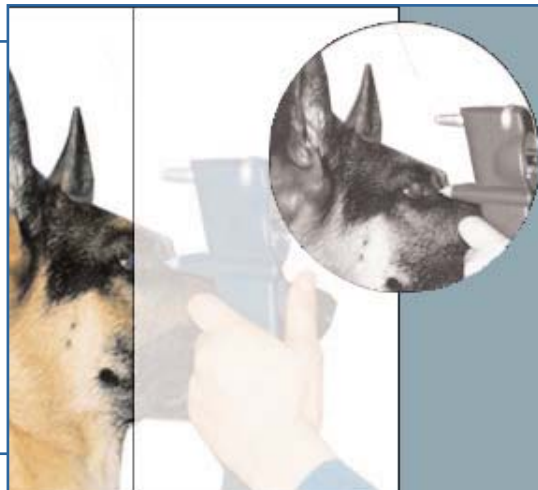

- Appareil maniable, léger et portable
- Pas d'anesthésie de l'animal
- Permet une mesure fiable et très rapide
- Sonde jetable, évitant tout risque de contamination, pas de problèmes dus à une détérioration à l'usage
- Calibration pour chats, chiens et chevaux
- Aucune connexion électrique avec le patient

Quand mesurer la pression intraoculaire ?

- Lors du suivi annuel des 42 races de chiens prédisposées au glaucome
- Lors de cas "d'oeil rouge"
- Lors de traumatismes crâniens
- Lors de traumatismes oculaires
- Lors d'examens gériatriques

Les différents types de glaucomes (primaires, secondaires et congénitaux) ne peuvent être guéris mais peuvent être contrôlés. Sa détection précoce est la seule façon de contrôler l'évolution d'un glaucome.

Races de chiens et de chats prédisposés au glaucome :

Afghan, Akita, Alaskan, Malamute, Basset Hound, Beagle, Border Collie, Boston, Terrier, Bouvier des Flandres, Caim Terrier, Cardigan Welsh Corgi, Chihuahua, Dachshund, Cocker Spaniel, Chow Chow, Dalmatien, Dandie Dinmont Terrier, English Springer Spaniel, Giant Schnauzer, Great Dane, Maltese, Manchester Terrier, Miniature Pincher, Norfolk Terrier, Norvegian Elkhound, Norwich Terrier, Saluki, Poodle, Pembroke Welsh Corgi, Samoyed, Scottish Terrier, Shih Tzu, Siberian Husky, Wire-Haired Fox Terrier, Tibetan Terrier, West Highland White Terrier, Whippet, Smooth-Coated Fox Terrier, Persans, Siamois.



Tonomètre vétérinaire

Un tonomètre digital est un investissement rentable !

- Seul moyen de réaliser une détection précoce du glaucome et donc d'apporter le meilleur service à son client. Comme tous les autres services, celui-ci contribue au développement de l'image de qualité de votre clinique
- L'utilisation du **TONOVET®** se justifie dans un nombre suffisamment important d'indications pour permettre son amortissement en facturant un faible montant la mesure de P.I.O.



Faites vos calculs suivant vos propres estimations :

Nombre de cas justifiant une mesure de P.I.O. par mois : 20
Montant facturé au client par mesure de P.I.O. : 10 €
Total facturé par mois : 200 €
Coût d'un Tono Vet par mois (sur 5 ans) : environ 50 €
Bénéfice/mois = 150 €
Avec 40 patients par mois facturés 20 euros, vous pouvez dégager près de 9000 € de bénéfice annuel !
Mais le plus important est que, avec 5 patients seulement par mois à 10 €, vous amortissez totalement votre investissement en 5 ans tout en apportant un réel service à votre clientèle ! Faites vos calculs !

Comment utiliser le **TONOVET®** ?

Le **TONOVET®** est présenté face à la cornée de l'animal. L'appui sur l'interrupteur principal entraîne la projection de la sonde sur la cornée. A chaque appui, une mesure est réalisée. L'appareil fournira ensuite le résultat final à partir de la moyenne de 6 mesures.

Le **TONOVET®** est alimenté par des piles qui lui fournissent une autonomie d'environ 600 patients. Le remplacement de la sonde après chaque utilisation évite les contaminations croisées.



Spécifications techniques :

Dimensions : 32 x 80 x 230 mm
Poids : 250g batteries incluses
Batterie : 4 AA
Mesure : 1-99 mmHg
Précision : 2 (50-30 mmHg), 10 % (30-80 mmHg)
Stockage : +5 à +40 C°

Distribution :



Mano Médical

Rue du Noroît - ZA des Alleux - F- 22100 TADEN - Tel. +33 (0)2 96858676 - Fax +33(0)2 96858677

E-Mail: welcome@manomedical.com

www.manomedical.com