

THÉRAPIE LASER

LT10 / by
Mano Médical

Un ATOUT supplémentaire
pour la médecine **vétérinaire**



Conçu pour les chiens, les
chats, les chevaux et les NAC



Efficace et spectaculaire sur :

- Traitement de la douleur
- Traitement de l'arthrose
- Traumatologie
- Aide à la cicatrisation



Mais aussi :


- Otites
- Lombalgies
- Gingivo-stomatites
- Abscesses dentaires
- Granulomes
- Dermatitis
- Cicatrisations difficiles
- Oedèmes
- Entorses
- Etc.

La thérapie laser permet d'offrir de nouveaux services appréciés par la clientèle.


Elle contribue à montrer le dynamisme d'une structure et à fidéliser sa clientèle.

Un matériel adapté vous apportera une efficacité réelle ainsi qu'un revenu supplémentaire non négligeable.

Rentabilité optimale !

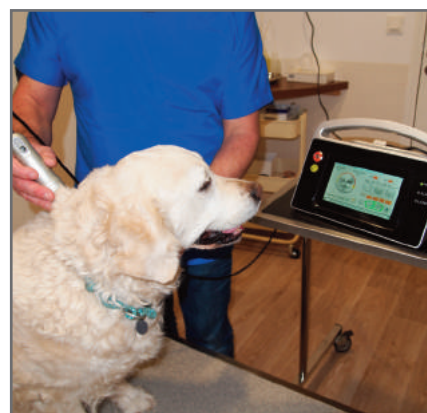

DEMANDEZ NOTRE SIMULATEUR BUDGÉTAIRE

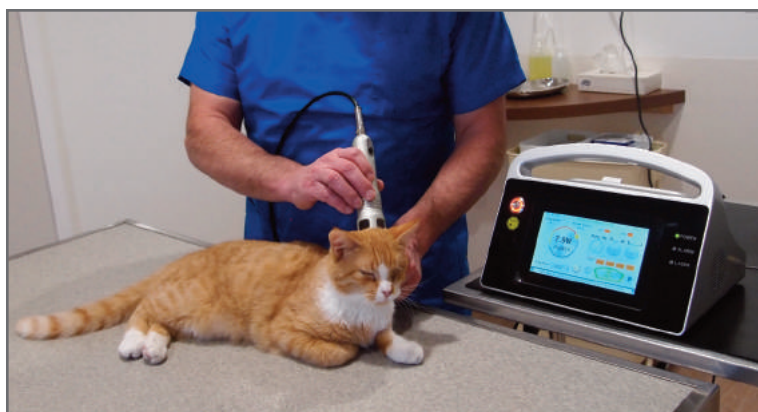

 **Mano
Médical**
Medical equipment for veterinarians

15, rue Noroit
22100 Taden - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76
Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com



Principes et Applications :

- Les principaux effets physiologiques de la thérapie laser :

● Effet décontractant :

- ▶ Vasodilatation
- ▶ Equilibrage ionique
- ▶ Stimulation de la production d'ATP

● Effet anti-inflammatoire :

- ▶ Vasodilatation
- ▶ Stimulation de la Phagocytose avec réduction de molécules responsables de l'inflammation
- ▶ Stimulation de la production de leucocytes

● Stimulation des défenses immunitaires :

- ▶ Vasodilatation
- ▶ Stimulation de la production de leucocytes
- ▶ Stimulation des macrophages

● Effet antalgique :

- ▶ Stimulation de la production d'endorphine
- ▶ Stimulation de la production d'ATP

● Effet anti œdémateux :

- ▶ Vasodilatation

● Aide à la cicatrisation :

- ▶ Stimulation des fibroblastes
- ▶ Stimulation de la production de collagène
- ▶ Stimulation de l'angiogénèse
- ▶ Stimulation immunitaire

La thérapie laser consiste en la bio-stimulation de tissus au moyen d'un faisceau laser d'une longueur d'onde choisie afin d'obtenir un effet thérapeutique



La liste des applications est directement en rapport avec les effets de la thérapie laser tels que décrits ci-dessus. Elle n'est pas exhaustive.

Toute application ayant pour objet d'obtenir l'un des effets décrits ci-dessus est potentiellement efficace.

Il faudra par contre connaître les contre indications, toujours prendre en compte les circonstances cliniques et surveiller les effets à court et à long terme pour adapter le traitement si nécessaire.



Une application et des règles simples

- Diagnostic clinique

La thérapie laser n'invente rien :

Seul un diagnostic correct et précis permet de réaliser un traitement adapté. De bonnes connaissances anatomiques et physiologiques sont donc nécessaires.

La quantification d'un traitement :

La puissance en Watts multipliée par le temps d'exposition total en secondes détermine la quantité d'énergie totale distribuée en Joules. Plus la puissance utilisée est importante pour un même traitement et plus le temps de traitement sera court.

Mais il y a des limites à utiliser une puissance élevée (Exemple : Peau sombre)

La quantité d'énergie totale émise n'est pas forcément la quantité d'énergie reçue par la partie anatomique ciblée.

Les protocoles sont donc élaborés en prenant en compte, entre autre, les paramètres suivants :

- ▶ Puissance nécessaire pour pénétrer jusqu'à la zone à traiter
- ▶ Puissance à ne pas dépasser pour ne pas générer des problèmes collatéraux
- ▶ Temps d'exposition adapté en fonction de la puissance choisie pour délivrer la quantité d'énergie nécessaire au niveau de la partie anatomique ciblée pour la surface déterminée. (La profondeur de la lésion entraînant des déperditions d'énergie, la quantité d'énergie totale émise doit augmenter en fonction de la profondeur de la lésion et de la densité des tissus)

Pourquoi chaque protocole intègre t-il des phases continues et des phases pulsées de fréquence variable ?

Les différents tissus composants les parties anatomiques ciblées répondent différemment en fonction des fréquences utilisées ; en utilisant systématiquement des phases continues et différentes fréquences, il est plus probable d'apporter l'énergie souhaitée aux différents composants tissulaires de façon adaptée.

- Réalisation d'un traitement

Toujours travailler de proximal à distal :

afin de permettre l'évacuation des flux générés par vasodilatation.

Application :

L'application doit se faire le plus perpendiculairement possible de la zone à traiter et au plus près de cette zone. Un mouvement continu permet d'éviter de trop réchauffer une zone donnée.

Travailler sur la peau, le poil limite la pénétration. Toujours contrôler la température de la zone traitée en touchant cette zone de temps en temps.

Choix des protocoles : quand on hésite entre 2 protocoles, toujours choisir le moins puissant pour commencer un traitement. Trop de puissance peut générer de la douleur.

Aigu ou chronique, quelles différences :

Le traitement d'un problème aigu devra se faire avec une puissance plus basse et une fréquence plus élevée que le traitement d'un problème chronique.

Ostéopathie, massage et traitements lasers :

L'addition de techniques permettant la mobilisation des articulations ou des tissus concernés par le traitement, si ces actions ne sont pas contre indiquées, ne peut qu'améliorer l'efficacité du traitement.



**Mano
Médical**

Medical equipment for veterinarians


15, rue Noroit
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com

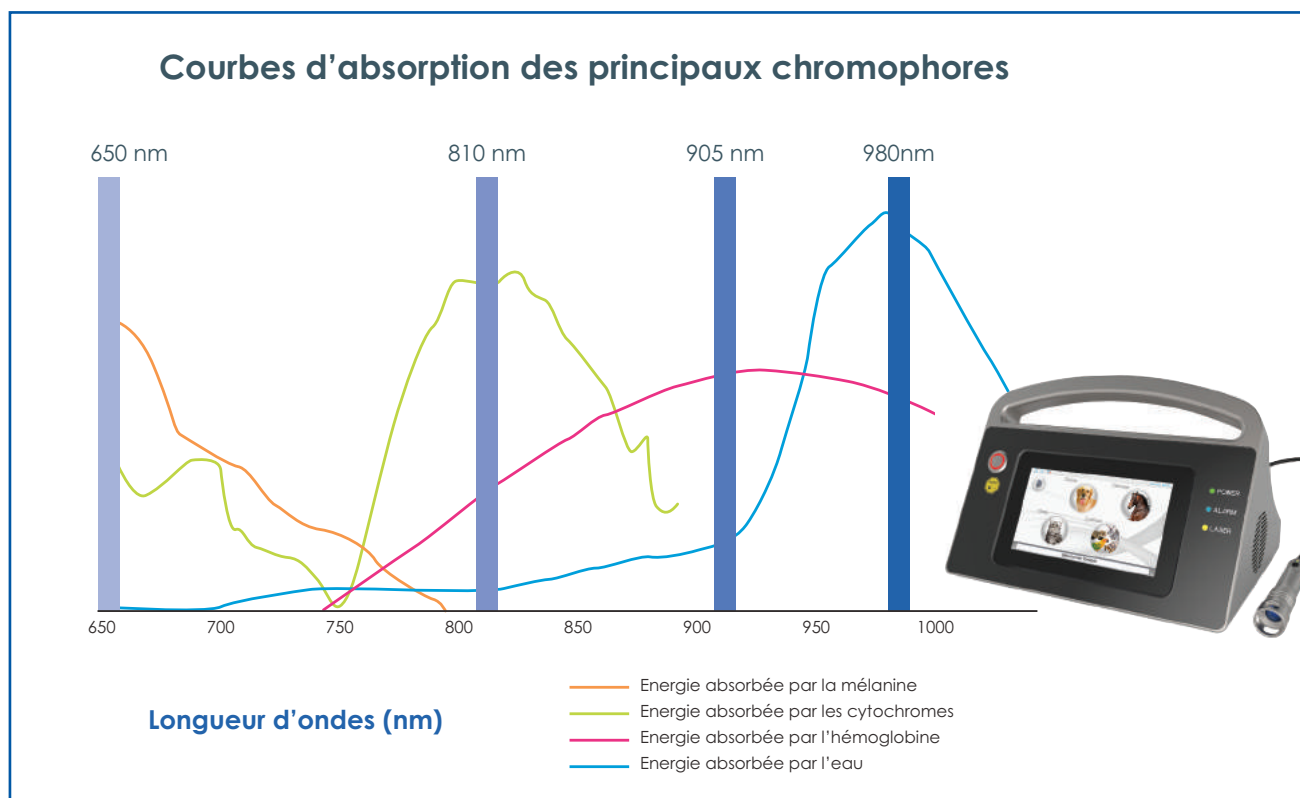

• Les longueurs d'onde :

- ▶ **650 nm** : Longueur d'onde d'absorption optimale par la mélanine : traitements superficiels de type granulome de léchage, plaies, brûlures et cicatrisations de surface
Longueur d'onde disponible avec le modèle LT10-3
- ▶ **810 nm** : Longueur d'onde d'absorption optimale pour la Cytochrome c oxydase favorisant la production d'ATP
- ▶ **980 nm** : Longueur d'onde d'absorption optimale de l'eau et forte absorption par l'hémoglobine

• Sécurité :

Notre matériel est fourni avec des lunettes de protection.

Il ne faut **JAMAIS** utiliser ce matériel sans que toutes les personnes présentes ne portent ces lunettes. Il faut être conscient que le faisceau laser peut causer des dégâts irrémediables à l'oeil que le faisceau soit dirigé directement vers l'oeil **MAIS AUSSI PAR RÉFLEXION DU FAISCEAU** sur une vitre ou, plus couramment en médecine vétérinaire sur une table en Inox.

ATTENTION

La thérapie laser ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :

- > Ne jamais appliquer sur l'oeil
- > Cancers : la thérapie laser stimule le développement cellulaire et est donc contre indiquée en cas de cancer
- > Ne pas appliquer sur la thyroïde
- > Ne pas utiliser sur les articulations des animaux en croissance (Ne pas traiter les cartilages de croissance)
- > Ne pas utiliser à proximité des fœtus pour les animaux gestants
- > Ne pas l'utiliser sur des tatouages
- > Ne pas utiliser en cas d'infiltration récente



Quelques exemples d'applications courantes en médecine vétérinaire



- ▶ Réduction de la douleur
- ▶ Aide à la cicatrisation post chirurgicale
- ▶ Aide à la cicatrisation de plaies
- ▶ Réduction de syndromes inflammatoires
- ▶ Réduction de douleurs arthrosiques
- ▶ Diminution des douleurs articulaires
- ▶ Traitement de problèmes gingivaux et dentaires
- ▶ Aide à la réparation de ligaments
- ▶ Aide à la réparation musculaire
- ▶ Réduction des œdèmes



Quelles fréquences et quelles durées pour quels traitements ?

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ▶ Arthrose | 3 fois la première semaine
2 fois la deuxième semaine
1 fois la troisième semaine
Puis un traitement toutes les 3 à 5 semaines suivant les résultats obtenus |
| ▶ Plaies et cicatrisations difficiles | 1 fois tous les 3 à 4 jours puis adapter la fréquence en fonction des résultats jusqu'à cicatrisation complète |
| ▶ Douleurs articulaires | 1 fois tous les 3 à 4 jours puis adapter la fréquence en fonction de l'intensité de la douleur et de l'efficacité du traitement |
| ▶ Gingivo-stomatites | 1 fois par jour pendant 2 à trois jours puis tous les 3 à 4 jours |
| ▶ Cicatrisations post-chirurgicales | 1 fois immédiatement après la chirurgie
1 fois au changement de pansement
1 fois lors du retrait des fils (visite de contrôle) |
| ▶ Autres traitements | |

D'une manière générale, tout traitement d'un problème aigu justifiera une fréquence de traitements plus élevée (plusieurs fois / jour si nécessaire) en utilisant des puissances plus basses.

Le traitement d'un problème chronique se fera à l'inverse avec une puissance plus élevée et une fréquence moins importante.



Simple et pratique :

- Portable : Petit, léger et silencieux
- Ecran tactile
- Interface simple et intuitive
- Protocoles pré-établis pour les différentes pathologies pour **le chien, le chat, le cheval et les NAC**, classifiés en 3 catégories : **reptiles, oiseaux et petits mammifères**
- Protocoles adaptés en fonction de la couleur du pelage de l'animal
- Possibilité de les modifier ou de créer de nouveaux protocoles
- Enregistrement de traitements personnalisés pour les patients
- Intégration dans les protocoles de différentes phases de traitement en continu ou à basse, moyenne ou haute fréquence
- Mode power pulse : jusqu'à 16 Watts




1

**Une interface
claire et intuitive**




2

**Choisissez l'animal
à examiner**

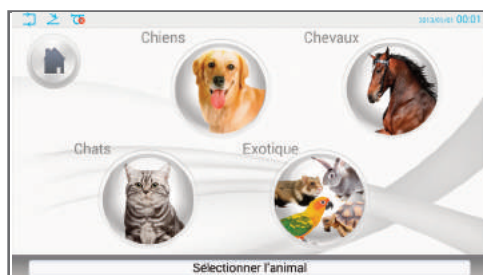

3

**Sélectionnez
les conditions du traitement**

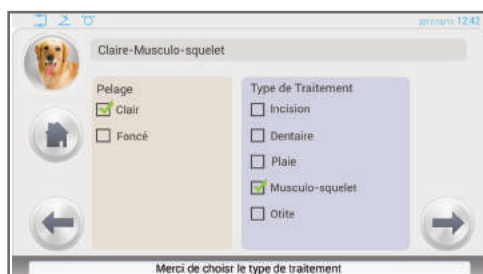

4

**Le protocole correspondant
est prêt à être lancé**



2 modèles au choix :

LT10-2 : 810 nm - 6 Watts
980 nm - 10 Watts

LT10-3 : 650 nm - 0,2 Watt
810 nm - 6 Watts
980 nm - 10 Watts

Mode Power Pulse :

Jusqu'à 16 Watts

**Mano
Médical**
Medical equipment for veterinarians

15, rue Noroit
22100 Taden - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76
Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com



Caractéristiques techniques

► Classification Laser	Classe IV
► Type de laser	Laser à semi-conducteur
► Source	Diode laser Arséniure de Gallium Aluminium (GaAlAs)
► Longueurs d'ondes	810 $\pm$ 10 nm et 980 $\pm$ 10 nm (modèle LT10-2) 650 $\pm$ 10 nm, 810 $\pm$ 10 nm et 980 $\pm$ 10 nm (modèle LT10-3)
► Diamètre de la fibre	600 μ m
► Puissance maximale	16W (mode power pulse)
► Taille du spot	> 15 mm
► Modes de fonctionnement	Onde continue ou onde pulsée de fréquence variable
► Longueur d'onde du laser de visée	650 $\pm$ 20 nm
► Fonctionnement du commutateur	Marche / Arrêt
► Poids	2,5 kg
► Dimensions	300 x 220 x 200 mm
► Puissance requise	12V - 5A
► Accessoires fournis avec l'appareil	1 pièce à main + câble 1 tête faisceau ① 2 paires de lunettes
► Options	Paires de lunettes supplémentaires Tête bulbe pour massage ② Tête fine intra-orale et intra-auriculaire ③ Kart sur roulettes



Lunettes de protection



Têtes pour pièce à main



Kart

Les lasers **LT10** sont éligibles au programme

MAD / by Mano Médical

- Garantie **totale** sans franchise ni vetusté
- **Pas** d'investissement
- **Zéro** immobilisation
- Une gestion **optimale** de vos coûts par acte

Contactez-nous pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**.

Mano Médical
Medical equipment for veterinarians

15, rue Noroit
22100 Taden - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76
Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com