



**ULTRA  
COMPACTS  
RAPIDES  
ÉCONOMIQUES**

# AUTOCLAVES **EcoSteam**

## Petits par la taille · Grands par l'efficacité

### Ultra compacts

Les autoclaves **EcoSteam** sont jusqu'à 6 fois plus petits et jusqu'à 3 fois plus légers que les autoclaves traditionnels de classe B.

#### EcoSteam FBS

▶ 25 (l) x 15 (H) x 56 (L) cm - 15 kg

#### EcoSteam FBL

▶ 27 (l) x 20 (H) x 56 (L) cm - 20 kg



### Ultra rapides

Les cycles de stérilisation sont 3 à 4 fois plus rapides qu'avec les autoclaves classiques.

#### EcoSteam FBS

▶ De 7 à 30 min selon le cycle


#### EcoSteam FBL

▶ De 9 à 43 min selon le cycle



Durée d'un cycle	Sans emballage RAPIDE / 134°C	Avec emballage Classe B / 134°C	Avec emballage Classe B / 121°C	En emballage PRION Classe B / 134°C
<b>EcoSteam FBS</b>	<b>7 MIN</b>	<b>15 MIN</b>	<b>30 MIN</b>	-
<b>EcoSteam FBL</b>	<b>9 MIN</b>	<b>18 MIN</b>	<b>30 MIN</b>	<b>43 MIN</b>

Capacité	Nbre maximum de sachets	Poids maximum	Volume de la cuve
<b>EcoSteam FBS</b>	<b>8</b>	<b>0,5 kg</b>	<b>2,7 l</b>
<b>EcoSteam FBL</b>	<b>16</b>	<b>1,0 kg</b>	<b>5,3 l</b>

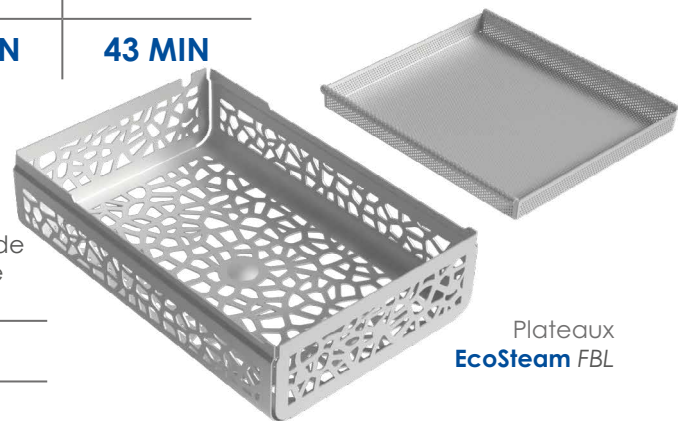

### Stérilisation d'urgence

Les cycles de stérilisation ultra courts vous permettront d'obtenir des instruments stériles en quelques minutes en cas d'urgence, ou de stériliser vos instruments courants pendant la journée de travail, entre les visites des patients.

 **Mano Médical**  
Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroît  
22100 Taden - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)

# Autoclaves EcoSteam FBS et BFL

## ● Intuitif

Les codes couleur des tuyaux d'alimentation et d'évacuation d'eau permettent une installation intuitive et rapide.

Pour mettre l'appareil en service, une prise électrique standard suffit.

En pratique :

1. Branchez l'appareil
2. Choisissez le cycle
3. Appuyez sur "START"



Écran EcoSteam FBS



Écran EcoSteam BFL



## Interface

L'écran tactile vous permet de piloter très simplement l'appareil.

## ● Silencieux

Les autoclaves EcoSteam fonctionnent de manière extrêmement silencieuse. Où que vous utilisiez votre appareil, personne ne remarquera qu'il fonctionne.



## ● Ergonomique

Avec leur design innovant, les autoclaves EcoSteam sauront trouver facilement leur place dans votre clinique !



# Révolution dans la stérilisation de votre instrumentation !

## Économique et Écologique

Le "filtre magique" révolutionne le processus de stérilisation de votre autoclave **EcoSteam**.

Il a été développé pour recycler en filtrant et déminéralisant l'eau issue des cycles de stérilisation précédents.

**Grâce au filtre magique, vous n'aurez plus besoin de réalimenter constamment votre autoclave avec de l'eau déminéralisée et économiserez ainsi énormément d'eau !**



Consommation moyenne pour 3 000 cycles :

3 à 4 litres d'eau déminéralisée  
**soit 250 à 300 fois de moins**  
qu'avec un autoclave classique !

	<b>EcoSteam FBS</b>	<b>EcoSteam FBL</b>
▶ Alimentation électrique	220-240V 50/60 Hz	
▶ Puissance	2,25 kW max.	3,25 kW max.
▶ Consommation max.	10 A	15 A
▶ Pression de travail	2,1 bar	
▶ Pression maximale	2,3 bar	
▶ T° maximale du processus	137°C	138°C
▶ Volume	2,7 l	5,3 l
▶ Poids	15 kg	20 kg
▶ Dimensions utiles	292 x 192 x 45 mm	300 x 200 x 90 mm
▶ Dimensions extérieures	561 x 252 x 162 mm	561 x 270 x 202 mm
▶ Niveau sonore	38 dB	40 dB
▶ Norme de protection	IP20 (CE Medical 93/42)	
▶ Nombre de plateaux	1	2
▶ Accessoires inclus	1 filtre HEPA, 2 tuyaux de raccordement (bleu et rouge) avec bouchons, 1 filtre magique	

 **Mano Médical**  
Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroît  
22100 Taden - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)